

**VIVAMAX** – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

## TERÁPIÁS MASSZÁZSPISZTOLY „INTENSE GUN”



Cikkszám: GYVM36

**Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!**

## Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetészerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót. Ha szükségét érzi, mindenképp konzultáljon orvosával.

## Tartalom

|  |   |
|--|---|
| Általános leírás.....                                  | 2 |
| Termékjellemzők.....                                   | 2 |
| Vigyázat!.....   | 3 |
| Biztonsági figyelmeztetés.....                         | 3 |
| A készülék használata.....                             | 4 |
| Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata..... | 4 |
| Karbantartás és tisztítás.....                         | 5 |
| Hibaelhárítás.....                                     | 5 |
| Hulladékkezelés.....                                   | 6 |
| Műszaki adatok.....                                    | 6 |
| Webes támogatás és Vivamax termékajánló.....           | 6 |

## Általános leírás

Sokat ül számítógép előtt? Keveset mozog? Nincs ideje karbantartani izmait?

Az egyénre szabott, intenzív masszázsterápia igazi segítség azoknak, akik görcsös, merev izmokkal küzdenek.

A terápiás masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázzsal aktiválja az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

Ergonomikus formájának és cserélhető masszázsfujeinek köszönhetően számos testtájon hatékony: használhatja izomfájdalmak (nyak-, váll-, hát-, láb és derékfájás stb.) esetén, de rendszeres használata enyhítheti a stressz és az ebből adódó álmatlanság tüneteit is.

Mindemellett növelheti a mozgás hatékonyságát és javíthatja a test lágy szövetéinek egészségét.

Növeli az izmok véráramlását edzés előtt, edzés után pedig csillapíthatja az izomfájdalmat.

Hat masszázsfaj tartozik hozzá, amelyek a test különböző részeinek masszírozására lettek kifejlesztve.

## Termékjellemzők

### A csomag tartalma

- 1 db Vivamax „IntenseGun” Terápiás masszázspisztoly
- 1 db újratölthető lítium-ion akkumulátor (akár 6 óras töltés nélküli használat)
- 1 db használati utasítás
- 1 db hordozó táska
- 6 db cserélhető fej



## Vigyázat!

Kérje ki orvosa véleményét, amennyiben:

- Ön várandós
- szívritmus-szabályzója van
- aggodalmai vannak az egészségi állapotát illetően.

A készülék használatát és működtetését felügyelet nélkül semmiképpen sem javasoljuk mentálisan sérült és értelmi fogyatékkal élőknek, továbbá gyerekeknek, mivel az áramütéshez vagy más baleset bekövetkezéséhez vezethet.

## Biztonsági figyelmeztetés

- Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa!
- Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 10 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.
- Ne használja hosszabb ideig (maximum 1 perc) a test egy pontján a készüléket.
- Ne használja, duzzadt, gyulladt testrészen, illetve, ha bőrsérülései vannak!
- Kizárólag ruhán keresztül ajánlott a készülék használata.
- Gyermekek és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után. Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban! Ne próbálja önmaga megszerelni!
- Ha a kábel vagy a villásdugó sérülését érzékeli, ha a készülék vizes lesz, vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá a készüléket! Forduljon a garancialevélen található szervizhez!
- A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg felületektől (radiátor, tűzhely, kályha)!
- Ne aludjon el a készülék használata közben!
- Ne használja, ha aeroszol gázok vannak a levegőben, vagy kevés az oxigén!
- Használat közben ne takarja le semmivel a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, és ez tüzet okozhat!
- Soha ne a kábelénél fogva emelje fel a készüléket, ne a kábelt használja fogantyúnak!
- Mielőtt áramtalanítja a készüléket, kapcsolja ki a masszázsfunkciókat.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechnikai eszköznek.
- Ne használja szabadtéren!
- Gyenge vérkeringésű személyek számára nem ajánlott a készülék használata!
- Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgyaktól!

- Ha bármilyen egészségügyi panasza van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- Nem helyettesíthet használatával orvosi ellenőrzést!
- Nem professzionális eszköz; fáradt izmok nyugtatására, lazítására tervezték.
- Szívritmus-szabályzóval rendelkező személyeknek nem ajánlott a készülék használata, ha mégis használni akarják, kérjék ki orvosuk véleményét.
- Egyszerre csak 10 percig használja, különben a motor túlmelegedhet! Néhány perc pihentetés után újra kezdheti a 10 percet.
- Ne alkalmazza a készüléket orvosi kezelés helyett!
- Lefekvés előtt nem ajánlott a készüléket használni, ugyanis serkenetheti a vérkeringést, ezáltal élénkíthet, nehezebbé téve az elalvást.

## A készülék használata

1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket! Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e!
2. Első használat előtt legalább 6 órán keresztül töltsze az akkumulátort a teljes töltöttség elérése érdekében.
3. Töltés után húzza ki a csatlakozó kábelt a készülékből.
4. Kapcsolja a készülék alján található kapcsolót „ON” pozícióba.
5. A bekapcsoló gomb egyszeri nyomásával választhatja ki az egyes, kétszeri megnyomással a kettes és háromszori nyomással a hármas fokozatot.
6. A kék LED lámpa jelzi a fokozati szinteket.
7. A bekapcsológomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki a készüléket.
8. Végül a készülék alján lévő kapcsoló „OFF” pozícióba való kapcsolással tudja teljesen kikapcsolni a készüléket.
9. A készülék 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
10. Az akkumulátor töltése közben a készüléket ne kapcsolja be, mivel az nem működik! Csak a töltőkábel lecsatlakoztatását követően kapcsolja be, a fentebb leírtak szerint.

## Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata

Az akkumulátorra rendeltetésszerű használat mellett 1 év jótállás érvényes. Kérjük, hogy alaposan olvassa át a használati útmutatót! A helytelenül, nem a leírtaknak megfelelően kezelt akkumulátorok a felhasználó hibájából hamarabb tönkre mehetnek, bizonyos esetekben használhatatlanná válhatnak. Az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

- Első használat előtt legalább 6 órán keresztül töltsze az akkumulátort a teljes töltöttség elérése érdekében.
- Töltéshez csatlakoztassa az adapter DC végét az akkumulátor töltőpontjához majd dugja be az AC kábelt a fali aljzatba.
- A készülék hátsó részén lévő villogó LED fény szolgál a töltöttségi szint és az aktív töltés jelzésére.
- A teljes töltöttséget a készülék akkumulátora akkor éri el, amikor az összes LED lámpa befejezte a villogást és folyamatosan világít.
- Az akkumulátort bármilyen töltöttségi fokozatban lehet tölteni.
- A lítium-ion akkumulátor esetében nincs memória hatás, így bármikor tölthető, ezért javasoljuk, hogy amikor csak teheti, töltsze fel. Várható élettartama 250-300 teljes

töltési-merítési ciklus. A lítium-ion akkumulátorok esetében 1 év alatt 25%-os kapacitás csökkenésről beszélhetünk, amely az idő előrehaladtával folyamatosan tovább csökken. Ez nagyban függ a használat és környezeti együtthatóktól is.

- A piros LED fény kigyulladás az akkumulátor teljes lemerülését mutatja, de ez a készülék rövidebb élettartamához vezet így nem ajánlott.
- Az akkumulátor működése egy feltöltéssel legalább 1,5-2 óra, de maximum 6 óra, amely függ a sebességi szinttől és a nyomás erősségétől.

## Karbantartás és tisztítás

**Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa az adapter kihúzásával!**

### A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, tárolja száraz, hűvös helyen a tároló táskájában! Tartsa távol éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa fel a készüléket a hálózati kábelnél fogva!

Az akkumulátort kizárólag feltöltött állapotban tárolja.

Ne feledje, az akkumulátorok az önkisülés jelensége miatt használaton kívül is merülnek, ezért a lemerült állapotban tárolt akkumulátor tovább merülhet és használhatatlanná válhat (ez az ún. mélykisülés).

A hosszabb időn keresztül használaton kívüli akkumulátort legalább havonta egyszer mindenképpen töltsse fel, így elkerülheti a mélykisülést és az akkumulátor szükség esetén azonnal használható. Az akkumulátorok töltése és használata egyaránt csak szobahőmérsékleten, száraz, pormentes, villamosági szempontból biztonságos környezetben történhet. Az elemeket, akkumulátorokat ne tárolja hűtőszekrényben! A közvetlen napsütés, tartósan 40 °C feletti vagy 5 °C alatti hőmérséklet, nedvesség egyaránt az akkumulátor károsodásához vezethet.

### B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl! (Ha a tisztítás előtt használta, akkor a kihűlés eltarthat néhány percre.) Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal tisztítsa! Nagyon figyeljen arra, hogy ne érje víz vagy semmilyen más folyadék a készüléket!

- Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!
- Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékoldót, üvegtisztítót és erős szűrű keféket! Ezek mind tönkretelhetik a készülék felületét.
- Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után!

## Hibaelhárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez!

| Hibajelenség                                    | Lehetséges okok   | Megoldás   |
|---|---|--|
| A készülék nem működik.                         | A készülék akkumulátora nincs kellőképpen feltöltve.<br><br>A készülék nincs bekapcsolva. | Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd töltsé fel.<br><br>Kapcsolja be a készüléket, elsőként a készülék alján lévő kapcsológombbal. |
| A készülék működés közben hirtelen megáll.      | Túl sokáig használta a készüléket, ezért a túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt.        | Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.  |
| Túl erősen vagy túl gyengén masszíroz.          | A készülék nem megfelelő szögben áll.   | Állítsa a készüléket a megfelelő szögbe.   |
| A készülék furcsa zajokat ad ki működés közben. | Valószínűleg a készülékben egy alkatrész meghibásodott.                                   | Forduljon szakszervizhez.  |

## Hulladékkezelés



A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé!

Kérjük lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre vonatkozó környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék)!

A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé Európában. Hogy megóvja a környezetre, és az emberi szervezetre történő káros hatástól, melyet az ellenőrizetlen tárolás hulladékkezelés okozhat, hasznosítsa felelősséggel, ezzel segítve az erőforrások hosszú távú újrahasznosítását! A már nem használható terméket kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére, ők gondoskodnak az újrahasznosításról!

## Műszaki adatok

|  |  |
|--|--|
| Terméknév                                  | „IntenseGun” Terápiás masszázspisztoly |
| Termékkód                                  | GYVM36                                 |
| Feszültség                                 | 220-240V, 50/60Hz                      |
| Adapter kimeneti feszültség                | AC 26V 5A                              |
| Adapter bemeneti feszültség                | DC 24V 1A                              |
| Akkumulátor típusa                         | Lítium-ion                             |
| Akkumulátor kapacitása                     | 1500 mAh                               |
| Súly                                       | 1,1 kg                                 |
| Rezgési frekvencia/fordulat 1es fokozatban | 1-30Hz / 1800 RPM                      |
| Rezgési frekvencia/fordulat 2es fokozatban | 2-40Hz / 2400 RPM                      |
| Rezgési frekvencia/fordulat 3es fokozatban | 3-53Hz / 3200 RPM                      |

## Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A [www.vivamax.hu](http://www.vivamax.hu) weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon

- Vivamax polarizált fényű lámpa
- Vivamax DeLuxe masszázssülés állítható nyakmasszázs
- Vivamax Shiatsu univerzális masszírozó
- Vivamax DeLuxe lábmasszírozó készülék légpárnákkal
- Vivamax DeLuxe kézi masszírozó készülék
- Vivamax Vitality kézi masszírozó készülék

Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!

Magyarországi importőr és forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag utca 37.

Tel.: +36-1/889-9080

info@vivaldi.hu

www.vivamax.hu

