

GYVT2 automatikus programmodok					
Program-mód	Program	Kezelési idő (perc)	Impulzus frekvencia (Hz)	Impulzus szélesség (µs)	Megjegyzés
TENS	P01	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	100	150	Fájdalom kapu mód
	P02	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	60	200	Fájdalom kapu mód
	P03	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	15	260	Alacsony frekvenciás mód
	P04	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	2-60	260-160	Modulált mód
	P05	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	10-60	200	Modulált mód
	P06	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	6-50	200	Modulált mód
	U1	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Alapértelmezett: 50 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 180 Módosítható: 100-300	Folyamatos mód
	U2	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Alapértelmezett: 60 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 160-260 Módosítható: 100-300	Impulzusmód moduláció
	U3	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Alapértelmezett: 60 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 260 Módosítható: 100-300	Intenzitás-modulált mód
EMS	P01	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	4	200	Aktív regenerációs mód
	P02	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	20	200	Állóképesség fejlesztő mód
	P03	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	50	200	Izomerősítő mód
	P04	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	60	200	Izomerősítő mód
	P05	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	50	200	Izomerősítő mód
	U1	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Alapértelmezett: 5 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 300 Módosítható: 100-300	Folyamatos mód (Aktív regeneráció)
	U2	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Alapértelmezett: 60 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Szinkrón mód* (Izomerősítés)
	U3	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Alapértelmezett: 70 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Váltakozó stimulációs mód (Izomerősítés)
Masszázs	P01	30	8	250	Folyamatos mód
	P02	30	100	220	Folyamatos mód
	P03	30	28-45	120-250	Gyúró masszázs
	P04	30	25-80	120-250	Dörzsölő masszázs
	P05	30	50-100	100-240	Ütögető masszázs

\* Az impulzusleadás minden csatornán egyidőben történik