

GYVT3 automatikus program módok						
Program-mód	Testrész	Program száma	Impulzus frekvencia (Hz)	Impulzus szélesség (µs)	Kezelési idő (perc)	Mód típusa
TENS	Nyak	P1	80-120	120-100	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		P2	4	150-200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		U1	Alapértelmezett: 35 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
	Váll	P1	80-100	100	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		P2	2-60	260-160	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		U1	Alapértelmezett: 100 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 150 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Burts mód*
	Kar	P1	2	250	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		P2	100	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Burts mód*
		U1	Alapértelmezett: 100 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
	Kéz	P1	100	100	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		P2	(2-10)	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		U1	Alapértelmezett: 60 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 260 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
	Hát	P1	10-60	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		P2	(6-10)	250	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		U1	Alapértelmezett: 55 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
	Has	P1	80-120	120-100	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		P2	120	55	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 100 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
	Csípő	P1	100	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Burts mód*
		P2	6-50	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált
		U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 180 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
Láb	P1	6-50	250	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
	P2	80	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
	U1	Alapértelmezett: 6- 10 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
Talp	P1	80-120	100-120	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
	P2	(2-10)	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
	U1	Alapértelmezett: 2- 60 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 260-160 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
Ízületek	P1	100	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Burts mód*	
	P2	120	100-120	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Modulált	
	U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 180 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos	
EMS	Nyak	P1	30	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	40	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 50 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Váll	P1	45	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	55	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Kar	P1	50	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	60	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 2-100	Alapértelmezett: 150 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Kéz	P1	4	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		P2	5	300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 150 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Hát	P1	60	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	70	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 80 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**

	Has	P1	20	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	50	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 60 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Csípő	P1	30	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	60	150	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 40 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 150 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Láb	P1	20	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		P2	80	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
		U1	Alapértelmezett: 25 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
	Talp	P1	4	200	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		P2	5	300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Folyamatos
		U1	Alapértelmezett:20 Módosítható: 20-100	Alapértelmezett: 200 Módosítható: 100-300	Alapértelmezett: 30 Módosítható: 5-90	Szinkrón**
Masszázs	Gyűrő	P1	28-44	120-250	30	Modulált
	Dörzsölő	P1	25-79	120-250	30	Modulált
	Kopogtató	P1	49-97	100-240	30	Modulált

*Lökésszerű üzemmód

** Az impulzusleadás minden csatornán egyidőben történik